

FICHA TÉCNICA: MASCARILLA FACIAL PROTECTORA YO ACTÚO- AIRNATECH PLUS HIGIÉNICA





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Esta máscara facial protectora YO ACTÚO-AIRNATECH PLUS HIGIÉNICA® es un equipo de protección respiratoria REUTILIZABLE hasta 20 lavados fabricada en España que cumple con los máximos estándares de calidad la cual ayuda a proporcionar protección contra partículas transportadas por el aire. Se expande para aportar una mayor sensación de amplitud, ayudando a aumentar el área de superficie y de este modo mejora la respiración. La mascarilla está compuesta por 3 capas las cuales se componen de una capa exterior de spunbond de 60gr., meltblown 25 gr de alta filtración, y spunbond de 20gr. ultra suave en la capa interior.

Nuestra mascarilla reutilizable ofrece protección frente a elementos fibrogénicos y es eficaz contra bacterias, virus y esporas de hongos y ofrece una protección frente al covid-19 de mas del 99,9% de filtración bacteriana gracias a nuestra alta calidad en los materiales utilizados.

Este producto no es una máscara quirúrgica y no debe utilizarse en quirófanos o en operaciones invasivas y tampoco es apta para proteger contra gases nocivos y vapor, operaciones subacuáticas, escapes y lucha contra incendios. Este producto no es adecuado para lugares de trabajo con llamas abiertas.

Este nuevo modelo de mascarilla es recomendable por su gran poder de filtración que sumado a su facilidad en la respirabilidad la hacen la opción más cómoda y segura existente ahora mismo en el mercado.

CARACTERÍSTICAS:

- Mascarilla reutilizable, hasta 20 lavados.
- Filtración mínima del 99%, proporcionando protección antibacteriana y antipolvo.
- Gomas elásticas laterales para ajuste perfecto.
- Uso diario
- Diseño de media mascara 3D
- Plegable.

PACKAGING:

- Presentadas en cajas de 112 unidades, embolsadas en pack de 5 unidades. Total 560 mascarillas.
- Dimensiones caja cartón: 13,5 x 13 x 19 cm




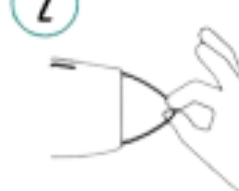



3 CM

17,0 CM

14, CM



INSTRUCCIONES DE USO:

- ES
- 1  Lavar las manos durante 40-60 segundos antes de manipular.
 - 2  Tocar solo las gomas elásticas.
 - 3  Poner sobre nariz y boca, asegurar que no quedan grandes espacios entre la cara y la mascarilla
 - 4  Fijar las gomas elásticas detrás de las orejas.
 - 5  Presionar la banda nasal para ajustarla correctamente a la nariz.